



Kundeinstruks: Prøvetaking av blod for organiske miljøgifter

Generell informasjon

Analysen av blodprøver utføres for å påvise de reelle konsentrasjonene av miljøgifter i blodet/serumet hos pasienten. Det vil si at prøvetakingen må utføres på en slik måte at den:

1. hindrer at konsentrasjonen i blodet påvirkes av at eventuelle miljøgifter lagret i fettvevet aktiveres utover det som er normalt
2. minimerer påvirkningen fra eventuelt matinntak de siste måltidene
3. reduserer risikoen for kontaminering av prøvene fra utstyr som benyttes

HMS

Blodprøver skal tas av kvalifisert helsepersonell.

Bestilling av analyser og behandling av resultater skal håndteres av kvalifisert helsepersonell.

ALS Laboratory Group AS tar ikke imot blodprøver/bestillinger fra privatpersoner.

Forsendelsen inneholder følgende

ALS Laboratory Group AS kan ved bestilling, sende ut prøvetakingsglass.

- Prøverør for blod/serum, 2*10 ml pr prøve
- Beskyttelsesrør i plast for forsendelse

Forberedelse

For å gi mest mulig representative verdier på analysen anbefales følgende:

Dagen før prøvetaking

- Unngå inntak av fet mat, men spis tilstrekkelig med mat (sett fra et energisyndspunkt)
- Unngå uvanlige aktiviteter som ikke er normalt for personen; som trening eller stressutløsende aktivitet
- Personen som skal tas prøve av bør ha en normal natts søvn av vanlig lengde før prøvetakingsdagen.



Prøvetakingsdagen

- Unngå å spise eller drikke et par timer før prøvetaking, men unngå også å være sulten.
- Unngå å la blodet/serumet komme i kontakt med transportbeholderen ved å benytte de tilsendte spesialrengjorte glassbeholderne fra ALS Laboratory Group Norway AS.
- Blodprøven rystes lett etter fyllingen slik at heparintilsatsen blander seg med blodet (hindre koagulering).
- Prøvemengde: 2 x 10 ml helblod

Merk både prøverørene og beskyttelsesrørene med deres prøvemerking.

Transport

1. Prøven kan sendes uten kjøling. Se til at glassrøret er beskyttet mot brekkasje under transport ved å benytte et plastbeskyttelsesrør eller liknende.
2. Send prøven slik at den leveres til ALS samme dag, eller dagen etter. Prøven bør ikke lagres over lang tid før analyse for å redusere usikkerheten i analyseresultatet.

Forsendelse/innlevering av prøver

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling.

Kontakt oss:

E-post: info.on@alsglobal.com
Sentralbord: 22 13 18 00